

VYHŘÍVANÝ NEBULIZÁTOR OH – 95



Vyhřívavý nebulizátor OH – 95 slouží k aplikaci zvlhčeného, ohřátého medicijního kyslíku, vzduchu, nebo nastavené směsi, zejména v případech:

- Oxygenoterapie
- Inhalace léčiv
- Resuscitace a pod.

Popis přístroje:

Vyhřívavý nebulizátor je určen pro zkvalitnění péče o pacienty ošetřované ve zdravotnických zařízeních, případně v domácím ošetřování. Díky své unifikované konstrukci má široké možnosti využití na všech odděleních zabývajících se léčbou horních nebo dolních cest dýchacích apod.

Základní funkční částí přístroje je elektronický regulátor teploty, který ovládá provoz topného tělesa umístěného uvnitř přístroje. Topné těleso ohřívá zvlhčovací lázeň ve speciální nádobě z nerezové oceli a skla. Tvorbu bohatého aerosolu zabezpečuje mikronebulizátor umístěný v horní části nádoby.

Přístroj je dodáván s přívodní tlakovou hadicí a vřapovanou patientskou hadicí standardního rozměru. Patientskou hadicí lze do požadované polohy nastavit pomocí ohebného ramene. Celý přístroj lze postavit na vodorovnou podložku, upevnit na držák vyhřívavého lůžka, případně přímo na lůžko pacienta nebo na pojízdný stojan, který umožní instalaci i dalších přístrojů.

Technické údaje:

Rozměry regulátoru: 200 x 200 x 130 mm
Teplotní rozsah: 25 – 40 °C závisí na průtoku
Napájecí tlak: 0,1 - 0,4 MPa
Medicijní plyn vzduch - kyslík
!!! nelze použít pro anestetické plyny !!!
Napájecí napětí 220 V / 50 Hz
Max. příkon: 65W

Volitelné příslušenství:

- závěs přístroje (k upevnění přístroje na infuzní stojan, lůžko pacienta a pod.)
- nastavitelné rameno patientské hadice
- rychlospojka případně průtokoměr pro napojení přístroje ke zdroji medicijního plynu